

# FORA Pelvis Kemerı Pelvic Sling

## Pelvis Bölgesi Kırıklarının Kontrolü

REF No.80-1101


NSN No.6515-27-068-8067



Mustafa Kemal Mah. 2141 Cad. Molmed  
Plaza 15/10 Çankaya/ANKARA



Fora Grup Savunma Teknolojileri  
ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.  
Fabrika : Şehit Osman Avcı Mah. 1404. Sk.  
No: 4 Etimesgut/ANKARA

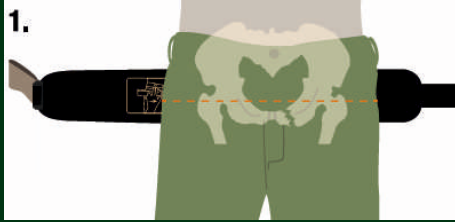

1. Yaralının cebinde veya pelvis bölgesinde bulunan nesnelere çıkarın. Pelvis kemerini siyah tokasından açarak yaralının alt tarafına siyah kısım kalçaya gelecek şekilde yerleştirin.



2. Siyah tokayı kilitleyin ve boşluk kalmayana kadar çekin.



3. **YEŞİL KAYIŞI** tutun ve **SİYAH KAYIŞI** zıt yönde çekin. Tam gerginlik sağlandığında bu ayarı koruyun ve siyah kayışı kemerin cırtlı yüzeyine bastırın.



FORA Pelvis Kemerı, ilk ve tek kuvvet kontrollü çevresel pelvis kemeridir.



Optimize edilmiş tek parçalı bir tasarıma sahip ve pelvis bölgesi kırıklarının güvenli ve etkili bir şekilde azaltma ve stabilize etmesi amacıyla tasarlanmıştır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler: 18x75 cm

Paket: 14x20x6 cm

Ağırlık: 375 g (Taşıma çantası ile)

Bilgi için

[www.foragroup.com](http://www.foragroup.com)

[www.taktikmedikal.com](http://www.taktikmedikal.com)



LOT



UDI-DI No: 8682169339461

Temel UDI-DI No: 8682169339461CD



8682169339461

MD