

FR19® GEN 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

PAKET BOYUTLARI VE AĞIRLIK

En: 7 cm
Boy: 14,5 cm
Yükseklik: 5 cm
Ağırlık: 85 g

UYGULAMA ÖLÇÜLERİ

Açık Uzunluk: 95 cm

MODELLER

FRT - EKS01 BL (Classic)
FRT - EKS01 BLU (Trainer)
FRT - EKS01 ORG (EMS)
FRT - EKS01 CYT (Coyote)



● FRT - EKS01 BL



● FRT - EKS01 BLU



● FRT - EKS01 ORG



● FRT - EKS01 CYT


NSN : 6515-27-070-0275	LOT 20220501	CE Fora Grup Sayınma Tekn. ve Dan. Tic. Ltd. Şti.	REF ● FRT-EKS01 BL ● FRT-EKS01 BLU ● FRT-EKS01 ORG ● FRT-EKS01 CYT
05/2022	YENİ HEKİM	8	
PATENT NO. 2020/07492	FR19® GEN 2	EXTREMİTE TURNİKE	



FR19® GEN 2 Ekstremitte Turnike, sadece sağlık uygulamalarında ve sağlık personeli tarafından uygulanmak üzere kullanılmalıdır.

ÇIKARMA TALİMATI


1. ADIM

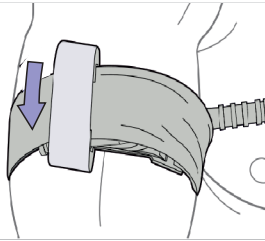

Herhangi bir sağlık personeline yönlendirilinceye kadar turnikeye dokunmayın.

Zaman bandını serbest bırakın ve ırgat kolunu sabitleme bölümünden çıkarın.

2. ADIM

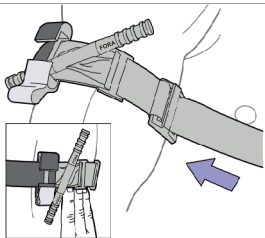

Sabitlemeyi sağladığımız kolunu cırttan ayırarak turnikeyi yaralının uzvundan çıkarın.



DİKKAT

* Ürünü satın aldıktan sonra ambalajından çıkarıp deneyiniz.



TASARIM TESCİL
2020/07492



UDI-DI 868216933902LLR




FORAGRUP
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE DAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.foragroup.com
www.taktikmedikal.com
www.forarmy.net

FR19® GEN 2 EKSTREMİTE TURNİKE


KULLANIM TALİMATI

1. ADIM

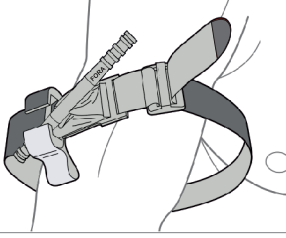


Yaralı bölgeyi tespit edin, **FR19® GEN 2**'yi yaranın 5-6 cm üzerine yerleştirin.

2. ADIM

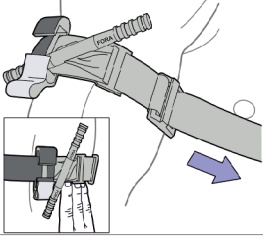


Kolonu (Kayışı) sıkıca çekin ve uzvun etrafından tekrar cırt ile kolonun kendi üzerine sabitleyin. Kolon, 3 parmağın uçlarının bant ve uzuv arasında kaymayacak şekilde sıkı olmalıdır. Üç parmağın uçları kolonun altında kayarsa, yeniden sıkın ve sabitleyin.

3. ADIM

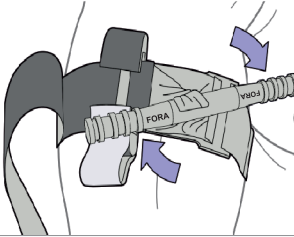


Kanama durana kadar dayanıklı plastikten yapılmış ırgat kolunu çevirin.

4. ADIM

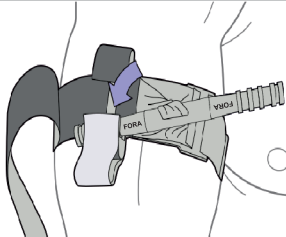

Kanama durduktan sonra ırgat kolunu koruma klipsinin içerisine sabitleyin. Kanama ve distal nabız kontrol edin. Kanama kontrol edilemezse veya distal nabız varsa, birinci **FR19® GEN 2**'nin yanına ikinci bir **FR19® GEN 2** ile ilave turnike uygulaması yapın.

5. ADIM

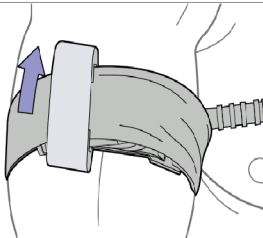

Kolonu sabitleme klipsinin arasından ve ırgat kolunun üzerinden geçirin.

Zaman bandını kolon ve ırgat kolu üzerinden sabitleyin ve uygulama süresini kaydedin.



DİKKAT



FR19® GEN 2 kıyafet üzerindeki sert cisimlerin üzerinden uygulanmamalıdır.

* Yaralanma bölgesi kolayca görünmezse, **FR19® GEN 2**'yi kol veya bacak üzerine mümkün olduğunca yüksekte ve sıkıca yerleştirin. Yaralıya müdahale daha uygun olduğunda, yaralı uzvu yeniden gözden geçirin ve **FR19® GEN 2**'yi yaranın 5-6 cm üzerinden doğrudan cilde yerleştirin.



www.foragroup.com
www.taktikmedikal.com
www.forarmy.net