

# OPERASYONEL SIHHiYE ÇANTASI KULLANIM TALİMATI

  
**FORAGRUP**  
www.foragroup.com  
www.taktikmedikal.com

**PATENT BEKLİYOR**

**TURK  
PATENT**  
TURK PATENT VE MARKA BÜRÜSÜ

Tasarım Tescil No  
2020/09125

**REF. NO: FR-20-OSC**

- \* Cordura kumaş
- \* Dayanıklı bağlantı tokaları ve aksesuarlar
- \* Universal Molle sistemleri
- \* Tam örtme sağlayan kapak sistemi
- \* Ağız büzgülü suluk cepleri
- \* Modüler çantalar



Yağmurluk



Körüklü Gizli  
Çep



Teçhizat Kemerine  
Dönüşebilen Bel  
Desteği



Beden Ayarlı  
Sırt ve Bel  
Desteği

Tam Örtme  
Kapak Sistemi

Fonksiyonel  
İç Çantalar

Mat, Sedye vb.  
Bağlantı Kolonları

Hızlı Çıkartma  
Aparatı

Universal Molle  
Sistemi



S  
M  
L  
XL





# OPERASYONEL SİHHiYE ÇANTASI KULLANIM TALİMATI

  
**FORAGRUP**

www.foragroup.com  
www.taktikmedikal.com

## Bel Desteđi Ayarlama



Adım 1



Adım 2

Adım 1'de görlen bel desteđini yukarı/ařađı ynl olmak zere kendi bel yapınıza gre ayarladıktan sonra bel desteđinin arkasında yer alan cırt sistemi vasıtasıyla Operasyonel Sıhhiye Çantasının arka kısmına sabitleyiniz. Daha sonra Adım 2'de gsterildiđi řekilde çantanın alt tarafından kapak kısmına uzanan sabitleme tokalarını kilitleyiniz.

## Sırt Desteđi Ayarlama



Adım 1

Adım 1'de grlen sırt desteđini yukarı/ařađı ynl olmak zere kendi sırt yapınıza gre ayarladıktan sonra sırt desteđinin arkasında yer alan cırt sistemi vasıtasıyla Operasyonel Sıhhiye Çantasının arka kısmına sabitleyiniz. Daha sonra sarı oklar ile iřaretlenmiř kolonlar ile sırt desteđini alt kısmından çantaya sabitleyiniz.



Adım 2

Adım 2'de sarı oklar ile iřaretlenmiř kolonlar vasıtasıyla sırt desteđini st kısmından çantaya sabitleyiniz.



Adım 3

Son olarak Adım 3'te sarı oklar ile iřaretlenmiř omuzluk zerinde yer alan ayar kolonlarını yerine takınız.

## Operasyonel Sıhhiye Çantası řahsi Beden Ayarlaması



Adım 1

Sırt ve bel desteđini çantaya sabitledikten sonra sırasıyla bellik ayarını, koltuk altı ayarını ve st omuzluk ayarını vcut yapınıza gre ayarlayınız.



Adım 2

Adım 1'deki iřlemlerin ardından gđs perlonu ayar tokasını bedeninize gre ayarlayınız.

FORA  
GRUP

TAKTİK  
MEDİKAL

